

Brugervejledning Luksus Otoskop Dansk

Anvendelse:

Gima luksus Otoskop bør kun bruges til at undersøge det ydre øre og til generel ikke-invasiv undersøgelse.

I modsætning til andre modeller gør dette otoskop brug af en halogenlampe og optiske fibre til at lede lysstrålen.

Gima luksus Otoskop leveres i etui af imiteret læder og er udstyret med et engangsspekulum.

Forsigtighed:

Otoskopet bør kun bruges til at undersøge øret, når der er monteret et engangsspekulum.

Produktet eller dets komponenter kan ikke bruges til formål forskellig fra den, der er angivet i denne manual. Brug ikke udstyret, hvis det er beskadiget.

Reparationer må kun udføres med originale reservedele, som skal installeres i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse.

Sådan bruges Otoskopet:

Otoskopet må kun indsættes i øregangen, når der er monteret en engangsspids.

Skub spidsen ind på instrumentet, så det indvendige fremspring går i indgreb i slidsen (1). Drej med uret spidsen til at låse.

Forstørrelseslinse:

Linsen(2) forstørrer ca.3x og kan drejes til side for instrumentering.

Generel belysning:

Otoskopet kan bruges med eller uden spids til generel belysning af f.eks. mundhulen eller huden. Undgå kontakt med følsom eller beskadiget hud.

Udskiftning af pære:

Med Gimalux-otoskopet skrues (mod uret) af hovedet fra håndtaget og træk pæren (3) nedad. Erstatte i den nye pære ved at skubbe den ind i hovedet som vist på billedet.

Før du fjerner pæren, skal du sikre dig, at instrumentet har været slukket i nogle minutter; ellers risikerer du at blive brændt.

Batterihåndtaget bruges til som håndtag på Gima Luksus Otoskopet.

Batterier:

2 alkaliske celler (AA / Lr6).

Instrumentstik:

Indvendigt gevind i håndtagshovedet (4).

Tænd:

Skub kontakten (5) ned.

Sluk:

Skub kontakten (5) opad.

Udskiftning af batterier:

Skru hovedet af (mod uret) og ryst de gamle batterier ud.

